BEDIENUNGSANLEITUNG

# AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001



## **SOFT 9.0X**

Version 5

DEKEMA Dental-Keramiköfen GmbH Industriestraße 22 D-83395 Freilassing (Alemania) Tel. +49 (0) 86 54 / 46 390 www.dekema.com info@dekema.com

## Inhaltsübersicht

<u>Teil 1: Arbeiten mit dem AUSTROMAT<sup>®</sup>_3001</u>	Seite
Einleitung	4
Ansichten und Bezeichnungen	5
Frontansicht, Tastatur	5
Rückansicht	6
Aufstellen des AUSTROMAT <sup>®</sup> 3001	7
Erstinbetriebnahme	7
Einschalten	8
Displayhelligkeit einstellen / Hauptmenü	8
Programme erstellen	9
1. Ebene: Programmname	9
2. Ebene: Brennprogramm	10
Befehle im Editiermenü	11
C-Befehl (Temperatur)	11
L-Befehl (Liftsteuerung)	12
T-Befehl	12
Haltezeit	12
Programmierung des akustischen Signals	13
V-Befehl (Vakuumregelung)	13
∎-Befehl (Befehlsverbinder)	14
Kopplung von T mit C bzw. mit L, Temperaturanstiegsrate	14
/-Befehl (Sprungbefehl)	15
Zusatzfunktionen im Hauptmenü	16
Brennkammer schnell abkühlen	16
Einzelne Programmspeicher kopieren oder löschen	16
Liftposition manuell einstellen	17
Vakuumpumpe manuell schalten	17
Programmablauf verfolgen	18
Beispielprogramm mit Erläuterungen	19
Typischer Dentinbrand	19
-ERROR-, akustisches und optisches Warnsignal	20
- ERROR	20
Vakuumwert, Liftposition oder Brennkammertemperatur blinkt links oben am Display	21

### Teil 2: Technische Informationen und Sicherheitshinweise

Lieferumfang	23
Technische Daten	23
Temperaturrichtwerte bei geöffneter Brennkammer	24
Maximale Aufheizgeschwindigkeit	25
Vakuumtabelle	25
Temperaturkalibrierung	26
Vakuumkalibrierung	28
Alle Programmspeicher löschen	29
Batteriewechsel	29
Das Qualitätsmanagement-Modul	30
Protokoll eines Brandes	30
Drucker	33
Systemdaten	
Sicherheitshinweise	37
I. Allgemeine Sicherheitshinweise	37
II. Spezielle Hinweise und wichtige technische Informationen	
Teil 3: Kurzanleitung und Programmiervorschläge	40
Kurzanleitung AUSTROMAT <sup>®</sup> 3001	41
Programmiervorschläge	42

Teil 1

Arbeiten mit dem AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001

## Einleitung

Sehr geehrte Zahntechnikerin, sehr geehrter Zahntechniker,

Sie haben mit dem AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001 ein Gerät erworben, das Ihre Arbeit noch besser und sicherer machen kann. Bei der Entwicklung dieses Gerätes wurde besonderes Augenmerk auf Ihre individuellen Anforderungen und Ansprüche gelegt.

Der AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001 zeichnet sich durch seine hervorragende Funktionalität, seine innovative Technik und sein hohes Qualitätsniveau aus. Er ist für automatischen Programmablauf nach Ihren spezifischen Erfahrungen und Erkenntnissen eingerichtet: Sie können bis zu 99 Programmabläufe frei festlegen und durch beliebige Programmnamen mit bis zu 25 Buchstaben und Zeichen kennzeichnen, wobei das werkseitig vorprogrammierte Programm 0 zum Vorwärmen der Brennkammer dient.

Bei der Programmierung können Sie eingeben

-	Temperatur in °C:	0 bzw. 100 bis 120	)0°C,
---	-------------------	--------------------	-------

- Liftposition in 10 Stufen: 0 (ganz unten) bis 9 (ganz oben),
- Vakuum in 10 Stufen, 0 (kein Vakuum) bis 9 (maximales Vakuum)
- Zeit in Sekunden: Bereich 20 bis 65000s,
- Akustisches Signal: Piepton 1x bis 9x als T1 bis T9
- "Befehlsverbinder"
  - T360.C900 = innerhalb von 360s linear auf 900°C aufheizen 0
  - T120.L9 = innerhalb von 120s stufenweise Lift auf L9 fahren (Brennkammer schließen) 0
  - **T055.C820** = mit Steigrate 55°C/min auf 820°C aufheizen. Wertebereich 02 bis 099 0 (2°C/min bis 99°C/min)

Die Programmierung von Abläufen lässt sich dadurch wesentlich vereinfachen und beschleunigen, dass einerseits Sprünge in andere Programme mit automatischer Programmfortsetzung möglich sind und andererseits Programme kopiert und bestimmte Daten dann einfach durch Überschreiben abgeändert werden können.

Damit Sie die vielfältigen Möglichkeiten Ihres AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001 optimal nutzen können, möchten wir Sie bitten, sich für diese Anleitung etwas Zeit zu nehmen. Die Art der Programmierung mag zunächst für Sie etwas ungewohnt sein; sie ist logisch aufgebaut, unkompliziert und leicht zu verstehen.

Sie werden bei sachgemäßer Nutzung viele Jahre Freude an Ihrem AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001 haben!

## Wichtig!!!

Bitte lesen und beachten Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise" im Teil 2 der Bedienungsanleitung. Sie finden dort außerdem wichtige technische Informationen über den AUSTROMAT<sup>®</sup>!

Ihre DEKEMA

"C-Befehl" "L-Befehl" "V-Befehl"

"T-Befehl"



Tastatur





## Aufstellen des AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001

- AUSTROMAT<sup>®</sup> an einem geeigneten Platz aufstellen.
- Vakuumpumpe an einem gut belüfteten, vor Staub und Schmutz geschützten Ort aufstellen. Die Lüftungsöffnungen der Vakuumpumpe dürfen nicht abgedeckt werden!
   Bitte halten Sie leicht brennbare und temperaturempfindliche Stoffe von der Pumpe fern.
- Vakuumschlauch ca. 2cm über die Schlauchtülle schieben.
- Befestigung des Pumpensteckers:
   Bitte überzeugen Sie sich, dass die Anschlusswerte der Vakuumpumpe (Typenschild der Pumpe) mit den Werten der Stromversorgung (Spannung/Frequenz) übereinstimmen.
   <u>230V-Version:</u> Pumpenstecker mit Schraubenzieher festschrauben (Kabel nach unten).
   <u>115V/100V-Version</u>:
  - 1. Positionierung der Führungsnut beachten und Pumpenstecker entsprechend einstecken.
  - 2. Pumpenstecker von Hand <u>fest</u> anschrauben und dabei das Kabel in Richtung Gerät nachdrücken.

Schlechter Kontakt in der Steckverbindung kann zur Beschädigung des Gerätes führen!

Das Geräteanschlusskabel an eine <u>geerdete</u> vorschriftsmäßige Steckdose anschließen.
 Anschlusswerte des AUSTROMAT<sup>®</sup> (Typenschild auf der Geräterückseite) müssen mit den Werten der Stromversorgung übereinstimmen.

Bei jedem Ortswechsel (auch nach einer Reparatur) sollte der AUSTROMAT<sup>®</sup> entsprechend der auf Seite 28 beschriebenen "Vakuumkalibrierung" auf den neuen Einsatzort eingestellt werden!!! Bitte führen Sie die Vakuumkalibrierung vor dem ersten Brand durch, um einen einwandfreien Programmablauf sicherzustellen.

### Erstinbetriebnahme

## Vor der ersten Inbetriebnahme bitte sorgfältig die Sicherheitshinweise ab Seite 37 dieser Bedienungsanleitung lesen!

- 1. Mit dem Netzschalter das Gerät einschalten.
- 2. → drücken
- 3. und dann <sup>Y Z</sup> drücken (L0: Brennkammer öffnen, Lift bewegt sich ganz nach unten).
- 4. Falls erforderlich, den Liftteller und den Dichtungsring vorher von Keramikstaub befreien:
  - Keramikstaub mit Pinsel und einem Auffangbehälter vorsichtig entfernen.
    - Keramikstaub nicht wegblasen, nicht absaugen und nicht einatmen!
  - Brenntisch auf den Liftteller aufsetzen.
- 5.  $\Box$  und dann  $\frac{f}{9}$  drücken (L9: Brennkammer schließen, Lift bewegt sich ganz nach oben).
- 6. Wenn die Brennkammer geschlossen ist, kann das Gerät ausgeschalten werden.

Niemals das Gerät ohne Brenntisch in Betrieb nehmen, da sonst der Liftteller überhitzt wird!!!

## Einschalten

## Displayhelligkeit einstellen / Hauptmenü

Nach dem Einschalten des AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001 steht im Display

[		** AUSTROMAT **		
B=XXX% \ SOFT \ (<>)				
	Spannung der Batterie, die d Programmspeicher mit Strom versorgt. Die Spannung sinkt Lauf der Zeit – sie sinkt ab ei 80% schneller. Sie sollten nu eine neue Batterie besorgen (siehe Seite 29)! Ab 50% Batteriespannung er ein akustisches Warnsignal. Daten werden bis zur unterst Spannungsgrenze (1%) zuve lässig gespeichert.	len Version der n Elektronik- t im Software twa in rtönt Alle ten er-	Anzeige für Pfeiltasten: Die <b>Taste</b> → erhöht die Helligkeit des Displays auf Maximum. Die <b>Taste</b> ← setzt die Helligkeit des Displays auf 60%.	
Nach Drü	icken einer der beiden Pfeilta	sten → oder ← erscheir	nt im Display das <b>Hauptmenü</b> .	
<u>Funktionen:</u> (die ausgewählte Funktion steht in <>)				
Aktuelle Temperat	Aktuelles tur Vakuum speicher	n- Eingabe- Lift manuell taste verfahren	Kopier- Vakuum Start-/Stopp- funktion schalten funktion	.]
C 24 \V0 \ <-MEM-> ENT LIF COP VAC R/S         MEM 0 \ BRENNKAMMMER VORWAERMEN         Ausgewählte Funktion, hier Programmnummer         Programmname				
Die Taste	<b>R/S</b> startet das	Liftposition manuell einst	tellen Vakuum manuell schalte	n
Vorwärme	en der Brennkammer	<b>Taste</b> $$ und Zahl 0 bis 0: ganz unten bis	9 <b>Taste</b> und Zahl 0 bis 0: kein Vakuum bis	39
Die Taste R/S startet ein		9: ganz oben	9: maximales Vakuum	
Die <b>Taste</b> Vakuump Saugens.	hltes Brennprogramm <b>R/S</b> stoppt ggf. die pumpe während des	Die <b>Taste</b> → stoppt der Die <b>Taste</b> ← stoppt den ebenfalls – bei nochmalige Drücken fährt der Lift in die Ausgangsposition.	n Lift. Bei V9 läuft die Pumpe Lift permanent, bei V1 bis V8 em schaltet die Pumpe nach e nach Druckverhältnis aut matisch.	je o-
Mit der <b>Ta</b> Programr starten, u vorzuwär	<b>aste R/S</b> das n 0 jeden Morgen m die Brennkammer men!		Fluten der Brennkammer <b>Taste</b> 😾 und Zahl 0 drücken.	:

### Programme erstellen

Wie im vorhergehenden Abschnitt erwähnt erscheint am Display folgendes Bild im Hauptmenü



Ausgewählte Funktion, hier Programmnummer Programmname

<-MEM-> ..... Mit den Tasten in und können Sie die Programmspeicher in 1-er Schritten vorwärts bzw. rückwärts anwählen. Die 10-er Stellen der Programmspeicher können Sie direkt mit den Zahlentasten vorwählen.

Wurde ein leerer Programmspeicher gewählt, erscheint folgendes Bild:



- **ENT** ..... **Taste ENT** schaltet in den *Editiermodus.* Hier können Sie den Programmnamen eintragen und Brennprogramme erstellen.
- **COP** ...... **Taste** schaltet in den *Kopiermodus*. Hier können Sie den Inhalt eines Programmspeichers auf einen anderen Programmspeicher übertragen (siehe Seite 16).

#### 1. Ebene: Programmname

Nachdem Sie den gewünschten Programmspeicher gewählt haben, drücken Sie die **Taste ENT**. Das Display zeigt nun beispielsweise



Löschen einzelner Zeichen oder Zahlen: mit der Leertaste Der überschreiben.

Leerzeichen lassen sich mit der Taste R/S entfernen bzw. einfügen.

Leerzeichen einfügen: Cursor <u>unter ein Zeichen</u> stellen und mit der R/S-Taste alles ab Cursor nach rechts verschieben. Der Cursor wandert dabei mit. Wenn der Programmstring an der End-Marke im Display ansteht, wird er von 'hinten nach vorne' komprimiert (eventuell vorhandene Leerzeichen werden gelöscht). Programmdaten gehen nicht verloren.

Leerzeichen entfernen: Cursor auf <u>vorderstes Leerzeichen</u> stellen und mit der R/S-Taste die Programmsequenz rechts vom Cursor vorziehen (ein Leerzeichen pro Tastendruck).

Die **Taste**  $\leftarrow$  oder  $\rightarrow$  und die **Leertaste**  $\stackrel{\bigcirc}{\frown}$  haben automatische Wiederholfunktion, wenn sie länger gedrückt werden.

Ist die Eingabe des Programm-Namens beendet, wird der Name durch Drücken der **Taste ENT** abgespeichert. Sie gelangen automatisch zur Eingabe des Brennprogramms.

#### 2. Ebene: Brennprogramm

In der 2. Ebene des Editiermodus erscheint am Display folgendes Bild:

ENT ١ <

Das Display zeigt Eingabebereitschaft. Jetzt können Sie die verschiedenen Befehle frei programmieren. Lesen Sie dazu bitte aufmerksam die nachfolgenden Seiten dieser Bedienungsanleitung, in denen die <u>aufgabenspezifischen Befehle</u> erklärt werden. Mit deren Hilfe werden Sie Ihr individuelles Brennprogramm gestalten!!!

Tragen Sie nun Ihr individuelles Brennprogramm ein. Musterbeispiele finden Sie auf Seite 19, unverbindliche Programmiervorschläge für Brennprogramme finden Sie im Teil 3 dieser Bedienungsanleitung.

Mit den **Tasten** ← und → können Sie den Cursor auf jede gewünschte Position stellen.

Löschen einzelner Zahlen oder Befehle erfolgt durch Überschreiben mit der Leertaste

Leerzeichen lassen sich mit der Taste R/S entfernen und/oder einfügen:

Leerzeichen einfügen: Cursor <u>unter ein Zeichen</u> stellen und mit der R/S-Taste alles ab Cursor nach rechts verschieben. Der Cursor wandert dabei mit. Wenn der Programmstring an der End-Marke im Display ansteht, wird er von 'hinten nach vorne' komprimiert (eventuell vorhandene Leerzeichen werden gelöscht). Programmdaten gehen nicht verloren.

Leerzeichen entfernen: Cursor auf <u>vorderstes Leerzeichen</u> stellen und mit der R/S-Taste die Programmsequenz rechts vom Cursor vorziehen (ein Leerzeichen pro Tastendruck).

Die **Taste**  $\leftarrow$  oder  $\rightarrow$  und die **Leertaste**  $\stackrel{\bigcirc}{\overset{\bigcirc}{\overset{\frown}{\phantom{\bullet}}}}$  haben automatische Wiederholfunktion, wenn sie länger gedrückt werden.

**Taste ENT** beendet den Editiermodus. Die Daten werden durch die elektronische Steuerung auf logische Ausführbarkeit geprüft. Sind die Daten "O.K.", werden sie abgespeichert. Bei fehlerhafter Programmierung erscheint -ERROR- am Display, der Cursor bleibt zu Beginn der ersten fehlerhaften Sequenz stehen.

## Befehle im Editiermenü

Aus den Befehlen **C** für die Temperatur, **L** für den Lift, **T** für die Zeit und **V** für das Vakuum wird mit den zugehörigen Wertangaben ein Brennprogramm zusammengestellt.

Die einzelnen Programmschritte (= Befehl + Wertangabe) werden nach dem Start des Programms in der eingetragenen Reihenfolge Schritt für Schritt ausgeführt. Jeder Befehlsaufruf bleibt so lange aktiv, bis er geändert oder aufgehoben wird.

Der AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001 kann folgende Befehle verstehen und ausführen:

C-Befehl	Temperaturregelung	Seite 11
L-Befehl	Liftsteuerung	Seite 12
<b>T</b> -Befehl	<ol> <li>Zeitsteuerung</li> <li>Programmierung des akustischen Signals</li> </ol>	Seite 12 Seite 12
V-Befehl	Vakuumregelung	Seite 13
-Befehl	<ol> <li>Befehlsverbinder</li> <li>Temperaturanstiegsrate</li> </ol>	Seite 14 Seite 14
/-Befehl	Sprungbefehl	Seite 15

### C-Befehl (Temperatur)

Für Temperatureinstellungen muss der C-Befehl in die Eintragsreihe eingetragen werden.

Die Befehlsform ist: CXXXX

Temperaturangabe in <sup>O</sup>C

Wertbereich: 0 bzw. 100 bis 1200, 1-, 3- oder 4-stellig

Richtig: C0 Richtig: C625

Falsch: C90	Temperatur zu niedrig
Falsch: C1300	Temperatur zu hoch
Falsch: C 400	Zwischen <b>C</b> und der Temperaturangabe kein Leerzeichen setzen!
Falsch: C	Temperaturangabe fehlt

Der C-Befehl regelt auf die gewünschte Temperatur mit *maximaler* Temperaturanstiegsrate (siehe Seite 25; zur zeitgeregelten und zur linearen Temperaturzunahme siehe Seite 14f.)

Mit **C0** wird die Heizung ausgeschaltet und das Programm setzt fort! Der letzte im gewählten Programm eingetragene C-Befehl bleibt auch nach Ablauf des Programms aktiv!

L-Befehl
----------

#### Liftsteuerung:

Für Lifteinstellungen muss der L-Befehl in die Eintragsreihe eingetragen werden.

Die Befehlsform ist: LX Positionsangabe 0 bis 9: - Position 0 ist ganz unten - Position 9 ist ganz oben Richtig: L0 Richtig: L3 Falsch: L10..... Positionsangabe zu hoch Zwischen L und der Positionsangabe darf kein Leerzeichen gesetzt sein! Falsch: L 6..... Falsch: L.... Positionsangabe fehlt - Eine unter Vakuum befindliche Brennkammer wird durch einen Liftbefehl L0 bis L8 automatisch Hinweis: geflutet. Sie können sich den VO-Befehl sparen! - Nach dem Fluten ist eine Sicherheitszeit integriert. Die Software zählt im Countdown 10 Sekunden, bevor die Brennkammer geöffnet wird (Zeit TXX links oben im Display angezeigt)!

Zeitgesteuerte Liftbewegungen lassen sich wie auf Seite 14 beschrieben programmieren.

T-Befehl

#### Haltezeit:

Für Zeitprogrammierungen muss der T-Befehl in die Eintragsreihe eingetragen werden.

Die Befehlsform ist: TXXXXX

Zeitangabe in Sekunden

Wertbereich 20 bis 65000, 2 bis 5-stellig

Richtig: T25 Richtig: T360

Falsch: T15.....Zeitangabe zu niedrigFalsch: T100000.....Zeitangabe zu hochFalsch: T 360....Zwischen T und der Zeitangabe darf kein Leerzeichen gesetzt werden!

Der T-Befehl bedeutet: "Den vorhergehenden Befehl für die Dauer der eingetragenen Zeit aufrechterhalten." Das Programm wird nach Ablauf der vorgegebenen Zeit mit dem darauf folgenden Befehl fortgesetzt.

Erinnerung: Jeder Befehl bleibt solange aktiv, bis er geändert oder aufgehoben wird!

#### Programmierung des akustischen Signals:

Für die Programmierung des akustischen Signals muss der **T-**Befehl in die Eintragsreihe eingetragen werden.

Die Befehlsform ist: **T**X

Anzahl der Signale von je ca. 1,5 Sekunden Dauer, 1 bis 9

Richtig: T1 Richtig: T9

Falsch: T10..... Anzahl der Signale zu hoch. Falsch: T 3..... Zwischen T und der Anzahl der Signale darf kein Leerzeichen gesetzt werden! Falsch: T ....... Anzahl der Signale fehlt.

Das akustische Signal kann an jeder beliebigen Stelle in die Eintragsreihe eingetragen werden.

Das akustische Signal kann mit der **Taste** → während des Programmablaufs abgestellt werden!

### V-Befehl (Vakuum)

#### Vakuumregelung:

Zur Steuerung des Vakuums muss der V-Befehl in die Eintragsreihe eingetragen werden.

Die Befehlsform ist: VX

Vakuumwert 0 bis 9, in 10 Stufen. Vakuumwert 0 bedeutet: kein Vakuum bzw. Brennkammer fluten. Vakuumwert 9 bedeutet: maximales Vakuum.

Richtig: V0 Richtig: V5

Falsch: V10..... Vakuumwert zu hoch. Falsch: V 6..... Zwischen V und dem Vakuumwert darf keine Leerstelle gesetzt werden! Falsch: V ........ Vakuumwert fehlt.

Die Höhe des Vakuums in **mbar/hPa** entnehmen Sie bitte der Vakuumtabelle auf Seite 25 der Bedienungsanleitung.

Hinweis: - Eine unter Vakuum befindliche Brennkammer wird durch einen Liftbefehl L0 bis L8 automatisch geflutet. Sie können sich den V0-Befehl sparen!
- Nach dem Fluten ist eine Sicherheitszeit integriert. Die Software zählt im Countdown 10 Sekunden, bevor die Brennkammer geöffnet wird (Zeit TXX links oben im Display angezeigt)!

### .-Befehl (Befehlsverbinder)

### Kopplung von T mit C bzw. mit L:

Der .-Befehl verbindet einen T-Befehl mit einem C-Befehl <u>oder</u> mit einem L-Befehl.

Die Befehlsform ist:	TYYYY.CXXX
oder:	TYYYYLX

Der .-Befehl ist unmittelbar nach dem T-Befehl einzutragen!

Richtig: T20.L9 Richtig: T360.C958

Falsch: T60.V9.....T-Befehl und V-Befehl können nicht verbunden werden.Falsch: T360 .C930....Der -Befehl muss unmittelbar nach dem T-Befehl eingetragen werden!

Der .-Befehl dient hier dazu, eine Temperatur oder eine Liftstation in einer gewünschten Zeit zu erreichen.

Beispiele:

- T360.C930	"Innerhalb 360 Sekunden linear eine Temperatur von 930°C erreichen"
- T70.C500	"Innerhalb 70 Sekunden linear eine Temperatur von 500 <sup>0</sup> C erreichen"
- T90.L9	"Innerhalb 90 Sekunden Lift stufenweise auf die Position 9 fahren"

#### Temperaturanstiegsrate:

Der **AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001** kann auch den Eintrag des Temperaturanstieges bzw. -rückgangs in <sup>O</sup>C/min verstehen (=Temperaturanstiegsrate).

Die Befehlsform: **T0**YY.CXXXX

Temperaturanstieg pro Minute.

Wertbereich: 2 bis 99, 1 bis 2-stellig, unmittelbar T0 folgend

Durch das Voranstellen einer Null vor den Temperaturanstieg **pro Minute**, versteht die elektronische Steuerung, dass nicht ein Zeitwert, sondern ein Temperaturanstieg pro Minute eingegeben wird!

Beispiel: T075.C930 "Mit 75<sup>o</sup>C/min eine Temperatur von 930<sup>o</sup>C erreichen"

## /-Befehl (Sprungbefehl)

Der *I*-Befehl bewirkt einen direkten Sprung zu einem anderen Programmspeicher und die automatische Programmfortsetzung.

Die Befehlsform ist: IXX

XX steht als Ersatz für die Programmspeichernummer des Programms, welches fortsetzen soll.

Wertbereich:0 bis 99Stellenzahl:1 bis 2-stellig, unmittelbar / folgend

Richtig: /53 Richtig: /4

Falsch: / 7 ..... Zwischen dem /-Befehl und der Programmspeichernummer darf kein Leerzeichen gesetzt werden!

Die Programmfortsetzung erfolgt unterbrechungsfrei!

Um den /-Befehl an das Ende der Eintragsreihe zu setzen, müssen Sie den Cursor auf die 3. Stelle vor der Endmarke (Ende 2. Zeile im Display) stellen!

Jetzt können Sie den /-Befehl mit der **R/S-Taste** setzen und dann den gewünschten Programmspeicher mit den **Zahlentasten** eintragen.

## Zusatzfunktionen im Hauptmenü

### Brennkammer schnell abkühlen

Sie haben die Möglichkeit die Temperatur in der Brennkammer schnell bis auf die angegebene Temperatur abzusenken, wenn nach einem Programmstart die Temperatur der Brennkammer höher als die angegebene Starttemperatur ist.

Mit der **Taste** wird die Vakuumpumpe eingeschaltet. Sie saugt kühle Luft durch die Brennkammer. Der Tastendruck wird jedoch nur akzeptiert, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- die Anzeige für die Brennkammertemperatur blinkt links oben am Display,
- der Lift ist nicht in der obersten Liftposition.

Sobald die Brennkammertemperatur auf den Wert der angesteuerten Temperatur gesunken ist, wird die Vakuumpumpe **automatisch** abgeschaltet (manuell ausschalten: **Taste**  $\rightarrow$ ).

### Einzelne Programmspeicher kopieren oder löschen

Das Kopieren von Programmspeichern erleichtert Ihnen die Eingabe von Brennprogrammen enorm. Wenn sich verschiedene Brennprogramme sehr ähnlich sind, brauchen Sie nur eines einzugeben und dann dieses auf einen anderen Programmspeicher übertragen, sodass dann zwei identische Programmspeicher existieren. Als nächstes brauchen Sie dann lediglich den zweiten Programmspeicher gemäß Ihren Vorstellungen zu verändern. Diesen können Sie dann wieder kopieren und auf einen weiteren Programmspeicher übertragen, usw..

Beim Kopieren werden der Programmname und das Brennprogramm übertragen!

#### Vorgehensweise:

- 1. Im Hauptmenü wählen Sie den Programmspeicher an, der kopiert werden soll (Quelle).
- 2. Kopiermodus mit **Taste** aktivieren.
- 3. Im Kopiermodus den Programmspeicher anwählen, auf welchen die Daten der Quelle übertragen werden sollen (Ziel).
- 4. Kopierbestätigung mit Taste ENT, oder Abbruch mit Taste R/S.
- 5. Falls erwünscht, das neue Programm abändern (siehe Seiten 11ff).

Löschen einzelner Programmspeicher: Kopieren Sie einfach einen leeren Programmspeicher auf einen zu löschenden Programmspeicher.

### Liftposition manuell einstellen

Falls Sie die Liftposition manuell einstellen wollen, können Sie dies im *Liftmodus.* Den Liftmodus schalten Sie im Hauptmenü mit der **Taste** \_\_\_\_\_ ein. Am Display erscheint



L . == ..... zeigt Ihnen die aktuelle Liftposition.

Liftposition 0 bedeutet: Lift ganz unten

Liftposition 9 bedeutet: Lift ganz oben, Brennkammer geschlossen Jede Liftposition zwischen 0 bis 9 kann eingestellt werden.

L . LIFTPOSITION NEU

(0 bis 9) ..... hier können Sie die gewünschte Liftposition mit den Zahlentasten eintragen.

Nach Erreichen der gewünschten Liftposition befinden Sie sich automatisch im Hauptmenü.

Hinweise: - Eine unter Vakuum befindliche Brennkammer wird durch einen Liftbefehl L0 bis L8 automatisch geflutet. Sie können sich den V0-Befehl sparen!
- Nach dem Fluten ist eine Sicherheitszeit integriert. Die Software zählt im Countdown 10 Sekun-

den, bevor die Brennkammer geöffnet wird (Zeit TXX links oben im Display angezeigt)!

### Vakuumpumpe manuell schalten

Falls Sie manuell Vakuum in der Brennkammer erzeugen wollen, können Sie dies im *Vakuummodus*. Den Vakuummodus schalten Sie im Hauptmenü mit der **Taste** ein. Am Display erscheint



**V** . == ..... zeigt Ihnen den Istwert für das Vakuum in der Brennkammer.

Vakuumwert 0 bedeutet: kein Vakuum

Vakuumwert 9 bedeutet: maximales Vakuum

Jede beliebige Vakuumhöhe in Stufen von 0 bis 9 kann eingestellt werden. Bei V1 bis V8 schaltet die Pumpe nach Erreichen des entsprechenden Vakuumdrucks automatisch ab, bei V9 läuft die Pumpe permanent.

### V . VAKUUM NEU

(0 bis 9) ..... hier können Sie den gewünschten Vakuumwert mit den Zahlentasten eintragen.

Nach Erreichen des gewünschten Vakuumwertes befinden Sie sich automatisch im Hauptmenü.

Ausschalten der Vakuumpumpe während des Saugens: Taste R/S

Fluten der Brennkammer: Im Hauptmenü den Vakuummode einschalten und den Wert 0 eingeben.

Hinweis: Nach dem Fluten ist eine Sicherheitszeit integriert. Die Software zählt im Countdown 10 Sekunden, bevor die Brennkammer geöffnet wird (Zeit TXX links oben im Display angezeigt)!

## Programmablauf verfolgen

Nach dem Starten eines Programms mit der Taste R/S (=Run/Stop) erscheint am Display

Beispiel:

### -TEST- \ C625 T120 T180.L9 V9 T075.C930 V0 T60 C0 L0 T2 C625

Die eingetragenen Daten werden von der elektronischen Steuerung überprüft. Sollten Daten nicht "O.K." sein, so erscheint im "Info-Feld" **-ERROR-** und der Cursor zeigt auf den fehlerhaften Programmschritt. Wenn die Daten "O.K." sind, startet das Programm automatisch und es erscheint folgendes Bild:

#### Beispiel:



Der Befehl und die Wertangabe des laufenden Programmschrittes werden getrennt geschrieben.

So können Sie den Programmablauf genau verfolgen:

Programmname ansehen:	Durch Drücken der <b>Taste ENT</b> kann der Programmname während des Programmablaufes am Display angezeigt werden.
Laufendes Programm abbrechen:	Durch langes oder zweimaliges kurzes Drücken der <b>Taste R/S</b> kann ein laufendes Programm abgebrochen werden.
Durch since Drearsmachbruch wird au	ah dia Haizung ayagagahaltati Dag badaytat, daga dia Prannkammar

Durch einen Programmabbruch wird auch die Heizung ausgeschaltet! Das bedeutet, dass die Brennkammer auf Raumtemperatur abkühlt, wenn nicht ein Bereitschaftsprogramm oder ein anderes Programm, das einen Temperaturbefehl beinhaltet, gestartet wird.

## Beispielprogramm mit Erläuterungen

## **Typischer Dentinbrand**

Nach dem Starten des Programms mit der Taste R/S erscheint am Display

## -TEST- \ C500 T120 T120.L9 T60 V9 T045.C770 V0 T60 C0 L0 T1 C500

Leerzeichen zwischen den einzelnen Programmschritten müssen nicht gesetzt werden.

C500	Brennkammer auf 500°C Starttemperatur aufheizen/abkühlen
T120	120 Sekunden (2 Minuten) warten (Trocknen)
T120.L9	Brennkammer in 120 Sekunden (2 Minuten) schließen
T60	60 Sekunden (1 Minute) bei Starttemperatur und geschlossener Brennkammer vorwärmen
V9	Maximales Vakuum erzeugen
T045.C770	mit 45°C/min auf 770°C aufheizen (Endtemperatur)
V0	Brennkammer fluten
T60	60 Sekunden warten (Haltezeit)
C0	Heizung aus
L0	Lift direkt ganz nach unten fahren
T2	zwei akustisches Signale
C500	Bereitschaftstemperatur für den nachfolgenden Brand

Warum einen C0-Befehl (Heizung ausschalten) im Programm eintragen?

Sobald der Lift nach unten fährt, ist die Brennkammer geöffnet. Die elektronische Steuerung hält die Temperatur des vorangehenden C-Befehls aufrecht, solange kein neuer C-Befehl programmiert ist. Mit dem C0-Befehl wird die Heizung abgeschaltet:

- Nachfolgende Befehle werden ohne Verzögerung ausgeführt.
- Die Bereitschaftstemperatur für nachfolgende Programme wird schneller erreicht.

Wozu die Bereitschaftstemperatur?

- 1. Damit die Brennkammertemperatur durch den vorhergehenden C0-Befehl nicht zu weit absinkt.
- 2. Damit die Brennkammertemperatur beim Start eines nachfolgenden Programms bereits die Höhe der Starttemperatur erreicht hat.

## -ERROR-, akustisches und optisches Warnsignal

### - ERROR -

Der AUSTROMAT® 3001 zeigt am Display -ERROR-,

- 1. bei der Überprüfung eines Programms hier dürften keine Fehler auftreten, da jedes direkt auf dem AUSTROMAT<sup>®</sup> geschriebene Programm schon getestet worden ist –, wenn
  - eine fehlerhafte Programmierung vorliegt, z.B. von Programmen, die auf einem PC erstellt und noch nicht getestet wurden.
  - bei der Datenübertragung vom PC zum AUSTROMAT<sup>®</sup> Fehler aufgetreten sind.
  - Störungen am AUSTROMAT<sup>®</sup> vorliegen: wenden Sie sich bitte in Deutschland an den Hersteller DEKEMA oder einen unserer Servicepartner, in Exportländern an den jeweiligen Servicepartner von DEKEMA.
- 2. wenn folgende Temperaturgrenzen überschritten werden:
  - obere Temperaturgrenze 1250°C.
    - untere Temperaturgrenze 5°C

Brennkammertemperatur und **-ERROR-** werden in schneller Folge abwechselnd am Display angezeigt. Zusätzlich hören Sie ein akustisches Warnsignal.

Die untere Temperaturgrenze kann nur durch Beschädigung des Temperaturfühlers erreicht werden, oder durch eine Raumtemperatur unter 5°C – lassen Sie das Gerät sich akklimatisieren!

Die obere Temperaturgrenze kann nur durch einen Defekt an der elektronischen Steuerung erreicht werden. In diesem Fall das Gerät sofort mit dem Hauptschalter ausschalten: wenden Sie sich bitte in Deutschland an den Hersteller DEKEMA oder einen unserer Servicepartner, in Exportländern an den jeweiligen Servicepartner von DEKEMA.

## Vakuumwert, Liftposition oder Brennkammertemperatur blinkt links oben am Display

### Vakuumwert blinkt:

Sollte während des ablaufenden Programms innerhalb einer von uns festgelegten Zeit der gewünschte Vakuumwert nicht erreicht worden sein, so blinkt der aktuelle Vakuumwert links oben am Display.

Sie können sich, abhängig vom erreichten Vakuumwert, zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: 1. Fortsetzung des Programms mit **Taste** → mit aktuellem Vakuum.

- 2. Abbrechen des laufenden Programms mit **Taste R/S**:
  - Anschließend den Lift senken und dann den Dichtungsring auf dem Liftteller mit einem feuchten Tuch von Staub reinigen.
  - Reinigen Sie anschließend auch die Fläche, auf die der Dichtungsring bei geschlossener Brennkammer drückt.

Wird der gewünschte Vakuumwert trotzdem nicht erreicht, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Leistung der Vakuumpumpe stark nachgelassen hat, oder ein Defekt am Vakuumsystem vorliegt. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte in Deutschland an den Hersteller DEKEMA oder einen unserer Servicepartner, in Exportländern an den jeweiligen Servicepartner von DEKEMA.

### Liftposition blinkt:

Sollte der Liftmechanismus aus irgendeinem Grund nicht richtig funktionieren, so blinkt links oben am Display die aktuelle Liftposition. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte in Deutschland an den Hersteller DEKEMA oder einen unserer Servicepartner, in Exportländern an den jeweiligen Servicepartner von DEKEMA.

#### Brennkammertemperatur blinkt anhaltend:

- 1. beim Aufheizen:
  - Heizkörper erbringt nicht die geforderte Heizleistung.
  - Anstiegszeit zu kurz eingegeben.
  - Heizkörper verschlissen. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte in Deutschland an den Hersteller DEKEMA oder einen unserer Servicepartner, in Exportländern an den jeweiligen Servicepartner von DEKEMA.
- 2. beim Abkühlen: Immer, wenn eine Temperatur angesteuert wird, die niedriger als die aktuelle Brennkammertemperatur ist.
  - Siehe Seite 16 (Brennkammer schnell abkühlen).
  - Mit **Taste**  $\rightarrow$  kann die Programmfortsetzung erzwungen werden.

Teil 2

## **Technische Informationen und Sicherheitshinweise**

## Lieferumfang

Geräteeinheit AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001

Vakuumpumpe mit Vakuumschlauch und Anschlusskabel (je nach Ausführung)

Brenntisch

Geräteanschlusskabel

Ofenpinzette

Bedienungsanleitung

## **Technische Daten**

Versorgungsspannung	je nach Ausführung (Typenschild Rückseite). ~ 230 V 220240 V Wechselspannung / 50 – 60 Hz ~ 115 V 110120 V Wechselspannung / 50 – 60 Hz ~ 100 V 95105 V Wechselspannung / 50 – 60 Hz
Anschlusswert inklusive Pumpe	max. 1450 W
Gerätemaße	610 x 385 x 285 mm (H x B x T)
Gewicht	18 kg ohne Pumpe 24 kg mit Pumpe
Max. Brenn- und Presstemperatur	1200°C
Gerätesicherungen	je nach Ausführung ~ 230 V 2 x 6,3 A T 250 V ~ 115 V 2 x 16 A T 500 V ~ 100 V 2 x 16 A T 500 V
Mitgelieferte Vakuumpumpe	je nach Ausführung (Typenschild Pumpe): ~ 230 V 220240 V Wechselspannung / 50 – 60 Hz ~ 115 V 110120 V Wechselspannung / 50 – 60 Hz ~ 100 V 95105 V Wechselspannung / 50 – 60 Hz

Die angegebenen Werte gelten nur bei Verwendung der mitgelieferten Original-Vakuumpumpe!

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Verwendung einer anderen Vakuumpumpe entstanden sind!

## Temperaturrichtwerte bei geöffneter Brennkammer

Die Tabelle gibt Ihnen Richtwerte für die ungefähre Temperatur in °C am Brennobjekt an (Brenntisch + 20mm)!

Liftposition					ak	tuelle B	rennkar	nmerter	nperatu	r in °C					
9	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
8	200	250	295	340	390	440	490	540	585	635	690	735	790	845	900
7	175	215	255	295	345	385	435	480	520	570	620	670	720	775	-
6	150	185	225	255	300	340	380	425	460	505	550	595	655	-	-
5	140	165	200	235	270	310	340	380	420	460	505	550	-	-	-
4	125	155	185	210	245	280	315	345	390	425	465	-	-	-	-
3	120	140	170	190	225	250	290	320	355	390	-	-	-	-	-
2	110	130	150	170	200	220	250	290	320	350	-	-	-	-	-
1	90	110	130	145	170	190	215	245	270	290	-	-	-	-	-
0	80	100	115	130	150	170	195	205	225	245	-	-	-	-	-

## Maximale Aufheizgeschwindigkeit

Nur C-Befehl mit Wertangabe, ohne Aufheizzeit oder Temperaturanstiegsrate

300 -> 1200°C:

400 - 500°C	ca. 200°C/min
500 - 600°C	ca. 180°C/min
600 - 700°C	ca. 160°C/min
700 - 800°C	ca. 140°C/min
800 - 900°C	ca. 120°C/min
900 - 1000°C	ca. 100°C/min
1000 - 1100°C	ca. 80°C/min
1100 - 1200°C	ca. 60°C/min

500 -> 1000°C:	Ø (	ca.	130°	C/min
----------------	-----	-----	------	-------

## Vakuumtabelle

Originaleinstellung, VCA auf 232 (siehe Seite 28), Messungen bei 969hPa

	Relativdruck <b>hPa/mbar</b>	Absolutdruck hPa/mbar
V0	0	969
V1	52	917
V2	153	816
V3	264	705
V4	365	604
V5	472	497
V6	577	392
V7	685	284
V8	793	176
V9 Minimum (= Umschaltpunkt)	866	103
V9 Maximum (=45 sec. nach V9 Minimum).	< 934	<35

## Temperaturkalibrierung

#### 1. Möglichkeit: individuell

Alle **AUSTROMAT**<sup>®</sup> - Keramiköfen werden ab Werk mit der **tsw**-Methode (traditional silver wire) anhand des DEKEMA Silberproben-Kalibriersets justiert und kalibriert. Trotzdem können Abweichungen zu Ihren gewohnten Brenntemperaturen bestehen, da viele Faktoren Einfluss auf die effektive Temperatur am Brennobjekt ausüben. Daher kann es erforderlich sein, die Temperaturkalibrierung Ihren individuellen Vorstellungen anzupassen.

Diese Temperaturabweichungen können durch Änderung des "Celsius-Calibration-Factor", kurz CCF, ausgeglichen werden.

#### Wie Sie den CCF einstellen:

Wählen Sie im Hauptmenü den Programmspeicher 0 an (BRENNKAMMER VORWAERMEN) und schalten Sie den Editiermodus durch Drücken der **Taste ENT** ein.

Der Kalibrierfaktor kann nur nach Eintrag eines Codewortes geändert werden.

### Das Codewort lautet: CCF.1

Mit diesem Codewort wird der Programmname auf den <u>ersten 5 Stellen</u> hinter dem Schrägstrich überschrieben. Wenn Sie nicht korrekt eintragen, wird nur der Programmname verändert!

Durch Drücken der **Taste ENT** erscheint am Display der eingegebene CCF (der zulässige CCF-Bereich wird in Klammern angezeigt). Falls erforderlich, nehmen Sie nun Ihre Korrektur über die Zahlentastatur vor. Nach der Korrektur des CCF wechseln Sie durch Drücken der **Taste ENT** wieder ins Hauptmenü.

Wir empfehlen, kleine CCF-Korrekturen nach Gefühl vorzunehmen:

effektive Temperatur zu niedrig	->	CCF erhöhen
effektive Temperatur zu hoch	->	CCF reduzieren

Nehmen Sie <u>kleine</u> Korrekturen vor (z.B. CCF 0.985 verändern auf 0.982 bedeutet eine Verminderung der effektiven Temperatur um ca. 3°C.)

Sollten große Temperaturabweichungen bestehen, so sollten diese nicht mit Hilfe des CCF korrigiert werden.

In diesem Fall muss zuerst sichergestellt werden, dass keine technischen Fehler vorliegen!!!

#### 2. Möglichkeit: Silberprobe

DEKEMA bietet Ihnen die Möglichkeit eine Überprüfung der Kalibrierung mittels **tsw**-Methode (traditional silver wire) vorzunehmen. Bitte fordern Sie das notwendige Silberproben-Set für Ihren Ofentyp bei **DEKEMA** an. Verwenden Sie bitte ausschließlich dieses Set zur Kalibrierung Ihres **AUSTROMAT**<sup>®</sup> **M/3001/D**! Es eignet sich nicht zur Kalibrierung von Keramiköfen der Serie **AUSTROMAT**<sup>®</sup> **3001 press-i-dent**<sup>®</sup>!

#### Erläuterung:

Wir empfehlen die Kalibrierung mit Hilfe der Silberprobe <u>1 x pro Jahr</u> durchzuführen, bei Neugeräten das erste Mal nach ca. sechs Monaten.

Auch bei Auffälligkeiten (Brennergebnisse haben sich verändert) sollte eine Kalibrierung durchgeführt werden.

- ⇒ Die Silberprobe ist das Referenzmittel um den Keramikofen so einzustellen, dass er mit Neugeräten nahezu übereinstimmt, die das Werk von DEKEMA verlassen.
- ⇒ Vor einer Kalibrierung muss die Brennkammer überprüft werden! Der Heizkörper und das Thermoelement müssen in Ordnung sein!
- $\Rightarrow$  Ausschließlich das <u>Original-Kalibrierset von DEKEMA</u> verwenden!
- ⇒ Wenn der Wert der Temperaturkalibrierung (CCF) verändert wird, verändern sich damit die Brenntemperaturen in allen Programmen. Entsprechend müssen <u>Brenntemperaturen</u> der einzelnen Programme gegebenenfalls <u>korrigiert</u> werden!

#### Durchführung:

Für die Temperaturkalibrierung müssen die Brennkammer und das Dämmmaterial gut durchwärmt sein. Die Seitenwände des oberen Ofengehäuses müssen handwarm sein. Idealerweise einen Reinigungsbrand durchführen (Programmplatz 98)!!!

Den Silberdraht auf dem Brenngutträger positionieren (siehe Abbildungen) und das Brennprogramm für die Silberprobe starten (Programmplatz 99).

#### C625 T120.L9 T075.C961 T60 C0 L0 T2 C625

Nach Ablauf des Programms wird die Silberprobe nach den Abbildungen unten beurteilt. Mit Hilfe der Temperaturkalibrierung **CCF** können die angezeigte Temperatur und die effektive Temperatur in der unmittelbaren Nähe der Silberprobe aufeinander abgestimmt werden. Bitte beachten Sie dazu auch die vorhergehende Seite dieser Bedienungsanleitung.



## Vakuumkalibrierung

Je nach absoluter Höhenlage des Einsatzortes können die Vakuumstufen V1 bis V9 optimiert werden. Mit Hilfe der Vakuumkalibrierung, kurz VCA, wird der AUSTROMAT<sup>®</sup> mit seiner Vakuumpumpe, egal ob auf Meereshöhe oder in Bergregionen, auf die bestmöglichen erreichbaren Vakuumwerte eingestellt.

#### Wie wird das Vakuum justiert bzw. kalibriert:

Der Standardwert ist als V-SET mit 232 Punkten angesetzt (Skala im **AUSTROMAT**<sup>®</sup> intern von 0 bis 255 Punkte). Beim Justiervorgang wird vom **AUSTROMAT**<sup>®</sup> automatisch das maximale Vakuum, das innerhalb von 3 Minuten mit der angeschlossenen Vakuumpumpe erreicht werden kann, gemessen und angezeigt. Anschließend wird das Vakuumsystem automatisch auf Undichtigkeit geprüft. Verschlechtert sich das erreichte Vakuum innerhalb von 1 Minute um mehr als 2% des erreichten V-REF, wird der neue V-REF verworfen und der ursprüngliche Wert wieder eingestellt. Andernfalls kann dieser neue Wert als V-REF (Referenzvakuum bezogen auf die Ortslage) übernommen werden (Ein Rückgriff auf den Standardwert von 232 Punkten ist immer möglich).

#### Vorgehensweise:

- 1. Wählen Sie im Hauptmenü den Programmspeicher 0 an (BRENNKAMMER VORWAERMEN) und schalten Sie den Editiermodus durch Drücken der **Taste ENT** ein.
- 2. Die Vakuumkalibrierung kann nur durch den Eintrag eines Codewortes aktiviert werden.

### Das Codewort lautet: VCA.9

Mit diesem Codewort wird der Programmname auf den ersten 5 Stellen hinter dem Schrägstrich überschrieben. Wenn Sie nicht korrekt eintragen, wird nur der Programmname verändert!

- 3. Durch Drücken der **Taste ENT** erscheint am Display der Vakuumkalibriermodus. Der gültige V-REF wird angezeigt.
  - 3.1. mit der Taste 9 wird der VREF übernommen und die Justierungsautomatik gestartet.
  - 3.2. mit der **Taste 2** wird der VREF durch den Standardwert (232) ersetzt, die **Taste** → startet mit diesem Standardwert die Justierungsautomatik. Die **Taste** ← beendet den Vakuumkalibriermodus. Sie kehren zurück ins Hauptmenü.
- 4. Es folgen die automatisierten Tests für Vakuum, Dichtigkeit und Flutung.
- 5. Als Ergebnis erscheint
  - 5.1. der neue VREF, falls der Test erfolgreich war.
  - 5.2. -ERROR- , falls
    - kein Vakuum erzeugt werden konnte.
    - kein besseres Vakuum entsprechend mehr als 140 Punkte erreicht werden konnte.
    - der Druckanstieg beim Dichtigkeitstest größer als 2% vom erreichten Endvakuum war.

In diesen Fällen bleibt der ursprüngliche, vor dem Kalibriervorgang gültige V-REF aus 3.1 bzw. 3.2 erhalten.

- 6. Sie haben nun folgende Möglichkeiten:
  - 6.1. Übernahme des neuen bzw. alten VREF als neuen VCA und Rückkehr ins Hauptmenü durch Drücken der **Taste ENT**.
  - 6.2. Wiederholung der Prozedur mit Schritten 3.1 oder 3.2

## Alle Programmspeicher löschen

Wählen Sie im Hauptmenü den Programmspeicher 0 an (BRENNKAMMER VORWAERMEN) und schalten Sie den Editiermodus durch Drücken der **Taste ENT** ein.

Der Löschbefehl kann nur durch den Eintrag eines Codewortes gegeben werden.

### Das Codewort lautet: **MEM.0**

Mit diesem Codewort wird der Programmname auf den <u>ersten 5 Stellen</u> hinter dem Schrägstrich überschrieben. Wenn Sie nicht korrekt eintragen, wird nur der Programmname verändert!

Durch Drücken der **Taste ENT** werden alle Programmspeicher gelöscht! Die Software kehrt zurück ins Hauptmenü.

Achtung: einmal gelöschte Programme können nicht wiederhergestellt werden!

## **Batteriewechsel**

Alle Programme werden in einem RAM-Baustein gespeichert. Das RAM benötigt eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Sobald der **AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001** ausgeschaltet ist, übernimmt die Batterie die Stromversorgung. Die Batterie ist eine Lithiumzelle mit **3,6 Volt** Nennspannung und **750mAh** Kapazität und ist <u>nicht</u> aufladbar!

<u>Merke</u>: Der Batteriewechsel darf nur bei **eingeschaltetem** Gerät erfolgen, da sonst die korrekten Programmdaten verloren gehen können!

#### Batterie erneuern:

Schalten Sie den AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001 mit dem Hauptschalter aus und dann wieder ein!



- Drücken Sie bitte keine Taste.
- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräterückseite und merken Sie sich die Einbaulage der Batterie, beachten Sie die Polung!
  - Nach dem Lockern der Anschlussklemmen können Sie die Batterie herausziehen.
- Vor dem Einbau der neuen Batterie biegen Sie bitte die Anschlussdrähte passend an.
- Setzen Sie nun die neue Batterie richtig ein, achten Sie auf die richtige Polung und ziehen Sie die Klemmschrauben fest an.

#### Batterie prüfen:

- Durch Drücken der **Taste R/S** wird nun ein Messwert am Display gezeigt. Er sollte bei mindestens 100 % liegen.
  - *Tipp:* Was machen Sie, wenn 0% angezeigt werden?
    - Lassen Sie den AUSTROMÄT<sup>®</sup> 3001 bitte eingeschaltet, sonst sind gespeicherten Daten verloren!
    - o Kontrollieren Sie noch einmal: Stimmt die Polung?
    - Auch eine neue Batterie kann entladen sein!

Die verbrauchte Batterie sollten Sie nicht dem Haushaltsmüll zuführen, sondern gemäß landesspezifischen Richtlinien entsorgen.

## Das Qualitätsmanagement-Modul

Wenn das QM (=Qualitäts- und Managementmodul) aktiviert ist, kann ein <u>Protokolldrucker</u> Daten aus dem Ofen empfangen. Alternativ zum Drucker können Daten von einem PC empfangen werden und mit Hilfe des <u>Datenaufzeichnungsprogramms</u> (DRP) gespeichert und weiterverarbeitet werden. Dieses Datenaufzeichnungsprogramm ist im **D**EKEMA **S**oftware **P**ackage DSP enthalten.

Wählen Sie im Hauptmenü den Programmspeicher 0 an (BRENNKAMMER VORWAERMEN) und schalten Sie den Editiermodus durch Drücken der **Taste ENT** ein. Folgendes Codewort ist hinter dem Schrägstrich am Display einzutragen:

Codewörter allgemein:				
QM.E bis QM.Z	Das Codewort mit den Buchstaben E bis Z aktiviert QM. Mit den Buchstaben E bis Z wird ein Ofen benannt, damit jeder Ofen eine unverwechselbare <u>Kennung</u> hat. (A, B, C und D können nicht verwendet werden!)			
QM.	<u>Deaktivierung QM:</u> Codewort nochmals eintragen, aber diesmal mit einem Leerzeichen statt des Buchstabens! (Leerzeichen mit Leertaste <sup>OP</sup> eintragen)			
Codewörter Protokolldrucker:				
QM.E. bis QM.Z.	Der zusätzlich eingetragene <u>Punkt</u> am Ende des Codewortes aktiviert die Aussendung von Daten an den direkt am AUSTROMAT angeschlossenen <u>Drucker</u> (=print).			
QM.E bis QM.Z	Deaktivierung der Aussendung von Daten an den Drucker: Codewort nochmals eintragen, aber diesmal mit einem Leerzeichen statt des Punktes! (Leerzeichen mit Leertaste <sup>OP</sup> eintragen)			

Mit diesem Codewort wird der Programmname exakt auf den <u>ersten Stellen</u> hinter dem Schrägstrich am Display überschrieben und mit der **Taste ENT** bestätigt. Wenn Sie nicht korrekt eintragen, wird nur der Programmname verändert!

Wird QM aktiviert, wird am Display des Ofens der QM-Status mit Brandnummer angezeigt. Jedes gestartete Programm erhält eine fortlaufende Nummer (#).

### Protokoll eines Brandes

Voraussetzung: QM und die Aussendung von Daten an den Drucker müssen aktiviert sein (siehe Seite 33)!

<u>Beachte</u>: Wird ein Brennprogramm abgebrochen, erfolgt keine Auswertung und entsprechend auch kein Ausdruck des Protokolls! Am Display erscheinen 3 Striche.

Jedes gestartete Programm wird von Anfang an überwacht und erhält automatisch eine fortlaufende Nummer. Temperaturen und Vakuumwerte werden durch QM detailliert überwacht, mit aufgetretenen Soll-/ Istabweichungen gespeichert und nach einem Brand automatisch ausgedruckt. Anhand dieses Protokolls kann der Anwender <u>selbst</u> beurteilen, ob der Brandverlauf in Ordnung war oder nicht. Das Papier legt der Anwender seinen Arbeitsunterlagen bei. Ein Ausdruck könnte wie folgt aussehen:

		_			<u> </u>				
			==== AU	STRO	 MAT 30	D1 QM-PROTOCOL	Brandnummer		
			QN SY		ESULT ( ): CC	# 10 C- C/11 F= 1.000 VREF= 232 2	größter registrierter Fehler		
			ST	ART :	C=	392 V=0 L=0	beim Starten des Programms.		
				/ 450 - 450 / 700 - 700		C/ 461 C\ 449 T+ 3 C/ 701 C\ 699	Broppprogramm		
			C V	/ 450 9		V- 210 V\ 230	Dremplogramm		
			ME EN LO EN	EM 3 IT C45 C450	TEST 50 T60.L	9 T60 V9 T055.C700 V0 T60 C0	Das Protokoll wird mit 'END' beendet, um Vollständigkeit und Abschluss anzuzeigen. Das muss auf jedem Beleg zu sehen sein!		
Zei	Zeile 1: QM-Statusmeldung: # 10 steht für die Brandnummer 10 C- C/11 bedeutet größter registrierter Fehler 11°C. <u>Achtung</u> : maximale Anzeige ist 99! Beachte: \bedeutet Temperaturfehler negativ, also Temperatur zu gering / bedeutet Temperaturfehler positiv, also Temperatur zu hoch								
Zei	Zeile 2: Systemdaten CCF und VREF. Steht VREF auf Standardvorgabe (SET = 232), ist eine 2 nachgestellt. Wurde VREF durch die Vakuumkalibrierung eingestellt, ist eine 9 nachgestellt.								
Es	folger	n die	Angat	oen ül	ber Te	mperaturen und Vakuumwerte:			
C/	<b>450</b> :					der C-Befehl wurde ohne Verzögeru	ung erreicht		
C-	450	C/	461	C/	449	Temperaturstabilität bei 450°C mit N	Maximum und Minimum.		
C/	700	т.	+ 3			der C-Befehl wurde mit 3 Sekunden Verspätung erreicht. Grund könnte z.B. nachlassende Heizleistung des Heizkörpers oder schlechte Stromversorgung sein. Ursache kann auch eine zu steile Temperaturrampe sein. Überwachung erfolgt nur beim Aufheizen und ein Zeitwert wird nur dann angezeigt, wenn eine Verzögerung aufgetreten ist (T>0).			
C-	700	C/	701	C\	699	Temperaturstabilität bei 700°C mit	Maximum und Minimum.		
C/	450					keine Auswertung hinsichtlich zeitlic <u>Abkühlung</u> handelt (bei Abkühlung e	cher Verzögerung, da es sich um erfolgt keine Auswertung!)		
V	9	V-	210	V١	230	Es wurde mit maximalem Vakuum ( Umschaltpunkt zur Programmfortset unmittelbar vor dem Fluten. Interess Umschaltpunkt zur Programmfortset Umschaltpunkt V9 weiter an, da die Display nicht mehr angezeigt). Bei V bleiben, da die Pumpe abgeschaltet	V9) gebrannt. <b>V-</b> gibt den Messwert am tzung (=V9min) an, <b>V \</b> den Messwert ant ist der V-Messwert am tzung. Der Vakuumwert steigt nach dem Pumpe weiterläuft (wird jedoch am /1 bis V8 wird der Messwert konstant wird.		

<u>Beachte:</u> Aus dem Programm können maximal 8 Temperatureinstellungen mit Soll/Ist-Abweichungen übertragen werden.

Merke: Nach dem Brand wird automatisch ein Protokoll ausgedruckt. Das Display zeigt im Infofeld '-PRINT-' bis der Ausdruck fertig ist. Zusätzliche Ausdrucke können im Hauptmenü mit der Taste gestartet werden. (Dies ist nicht mehr möglich, wenn zwischenzeitlich Brennprogramme kopiert, ein Brennprogramm geschrieben oder eine Programmübertragung zwischen Ofen und PC vorgenommen wurde.

Branddefinition: Als Brand gilt eine Temperaturerhöhung > 50°C bei geschlossenem Lift (L>8).

Die QM-Statusmeldung <u>im Display</u> zeigt automatisch den größten C-Fehler an, damit ein Anwender ohne Drucker wenigstens darauf aufmerksam gemacht wird.

Die QM-Statusmeldung für das o.a. Beispiel wäre: QM.Q RESULT # 10 C- C/11

Wer mehr wissen will, braucht auf jeden Fall einen Ausdruck!

Und wo werden Fehler von Lift- und Vakuumeinstellungen gemeldet?

Am Ende der QM-Statusmeldung unter folgenden Bedingungen:

Bei V-Einstellung: Nach Ablauf des internen Zeitlimits (aktueller Wert blinkte im Display)

Bei L- Einstellung: Nach Ablauf des internen Zeitlimits (aktueller Wert blinkte im Display)

Die QM-Statusmeldung für die o.a. Beispiele wäre: QM.Q RESULT # 10 C- C/11 V L

### Drucker

Ist die Druckerausgabe aktiviert, sendet QM das 'AUSTROMAT 3001 QM-PROTOCOL' zur Schnittstelle. QM kontrolliert nicht, ob ein Drucker angeschlossen ist und/oder ob dieser auch druckbereit ist!

### Es entfällt jegliche Softwareabstimmung zwischen AUSTROMAT<sup>®</sup> und Drucker!

#### Drucker:

- jeder moderne Drucker mit serieller <u>RS232</u>-Schnittstelle (9600,8,N,1)
- die Drucktechnik (Nadel, Thermo, Tinte, Laser usw.) kann der Anwender beliebig wählen
- Der Drucker sollte einen Inputspeicher (Input-Buffer) von min. <u>1 K-Byte</u> haben
- Die Länge einer Zeile muss mindestens <u>32 Zeichen</u> betragen

Zur Sicherheit Drucker testen!

Datenkabel:	Das Datenkabel muss eine gute Abschirmung aufweisen!
<u>Beachte:</u>	Im externen Datenkabel vom <b>AUSTROMAT<sup>®</sup></b> zum Drucker müssen die Drähte zu den Stiften 2 und 3 gekreuzt angeschlossen werden! Alternativ kann am Datenkabel ein <u>Adapter</u> verwendet werden, in welchem die Drähte bereits gekreuzt montiert sind (im Fachhandel erhältlich).
	(Dieser Fall tritt immer ein, wenn zwei 'gleichberechtigte' Geräte mit gleicher Steckerbelegung zu verbinden sind (die anderen Leitungen können bei dieser Anwendung unverändert bleiben)!

#### Achtung: Beim Anschließen des Druckers an den Ofen sollten beide Geräte ausgeschaltet sein!

Für das Protokoll werden nur Standard-Druckzeichen verwendet, die jeder Drucker versteht!

Zum Druckbeginn sendet QM ein ESC-Steuerzeichen an den Drucker, um den Zeilenabstand auf 1/8 Zoll einzustellen *(ESC-Steuerzeichen werden von fast allen Druckern verstanden)*! Sonst bleibt der Zeilenabstand so, wie er im Drucker voreingestellt ist.

Die Protokollüberschrift und alle nachfolgenden Zeilen bis vor den Brennprogrammausdruck sind auf genau <u>32-Zeichen Textbreite</u> formatiert.

Das ist eine Standarddruckbreite und es sollte auch die Mindestbreite sein, die der eingesetzte Drucker zu Papier bringen kann! Sonst wird es unübersichtlich!

Beim Ausdruck des Brennprogramms ist die Textbreite nicht mehr begrenzt, damit der Drucker die eigene Papierbreite voll ausnutzen kann.

Zum Protokollende wird das Papier noch einige Zeilen vorgeschoben, um den Abriss ohne Textverlust zu ermöglichen. Gegebenenfalls kann der Anwender mit der Vorschubtaste am Drucker nachhelfen.

Mit der Taste  $\implies$  kann unter bestimmten Umständen in den Programmablauf eingegriffen werden. Normalerweise würde das Programm erst dann automatisch fortsetzen, wenn das jeweilige Ziel erreicht ist. (z.B. im ersten Beispiel die Temperatur C450).

Wenn der Vakuumwert, die aktuelle Liftstation oder der Temperaturwert links oben am Display blinkt, kann jedoch der Anwender mit der Taste in die Programmfortsetzung erzwingen.

Damit solche Manipulationen, welche eventuell zu fehlerhaften Brennergebnissen führen könnten, nicht unentdeckt bleiben, <u>beachten Sie bitte folgende Beispiele</u>!





### Systemdaten

Wählen Sie im Hauptmenü den Programmspeicher 0 an (BRENNKAMMER VORWAERMEN) und schalten Sie den Editiermodus durch Drücken der **Taste ENT** ein.

Die Systemdaten können nur durch den Eintrag eines Codewortes aktiviert werden.

### Das Codewort lautet: SYS.I

Mit diesem Codewort wird der Programmname auf den <u>ersten 5 Stellen</u> hinter dem Schrägstrich überschrieben. Wenn Sie nicht korrekt eintragen, wird nur der Programmname verändert!

Nach Drücken der **Taste ENT** zeigt SYSINFO die aktuellen <u>Systemdaten</u> als Zahlenreihe wie folgt an (hilfreich für telefonischen Service):

Beispiel: 107 1.000 232 2 12 (Batterie, CCF, VREF, VCA, Brandnummer)

<u>Beachte:</u> VCA = 9, wenn VREF durch VCA ermittelt wurde, VCA = 2 falls der Setwert übernommen wurde.

Zum Hauptmenü schalten die Pfeiltasten zurück.

## Sicherheitshinweise

Die **AUSTROMAT<sup>®</sup>** Keramiköfen sind so konstruiert, dass auch bei besonders hohen Belastungen eine lange und einwandfreie Betriebszeit erwartet werden kann.

Ist gegebenenfalls dennoch ein technischer Eingriff erforderlich (z.B. Wechseln des Heizkörpers), so sollte dieser von <u>autorisiertem Fachpersonal</u> vorgenommen werden.

Nach Instandsetzung ist der Keramikofen auf <u>Sicherheit</u> zu prüfen:					
Bundesrepublik Deutschland	VDE 0701				
International	laut den landesspezifischen Richtlinien				

## I. Allgemeine Sicherheitshinweise



Dieses Symbol warnt vor gefährlicher elektrischer Spannung, bei der Gefahr für Leib und Leben von Personen besteht.

Beachten Sie diese Hinweise und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.

- 1. Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist die Bedienungsanleitungsanleitung gründlich durchzulesen.
- Der Betreiber hat sich insbesondere mit den Sicherheitshinweisen und den Betriebsbedingungen vertraut zu machen, um Schäden an Personen und Material zu vermeiden. Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung und/oder aufgrund nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch auftreten, erlöschen jegliche Haftungs- und Garantieansprüche.
- 3. Vor dem Einschalten ist sicherzustellen, dass die Geräteausführung und die Netzspannung übereinstimmen.
- 4. Der Netzstecker darf nur in eine Steckdose mit Schutzkontakt eingeführt werden.





Vor einem Abgleich, einer Wartung, einer Instandsetzung oder dem Austausch von Teilen muss das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt sein, wenn ein Öffnen des Gerätes erforderlich ist (Ausnahme: Batteriewechsel).

- 6. Es ist sicherzustellen, dass nur Sicherungen vom angegebenen Typ und der angegebenen Nennstromstärke als Ersatz verwendet werden (siehe Geräterückseite).
- 7. Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät vom Netzstrom zu trennen und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern. Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist:
  - wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist,
  - wenn das Gerät nicht mehr arbeitet,
  - nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen.
- 8. Bei Blitzschlaggefahr das Netzkabel aus der Steckdose ziehen!

**Warnung!!!** Jegliche Unterbrechung des Schutzleiters innerhalb oder außerhalb des Gerätes oder Lösen des Schutzleiteranschlusses kann dazu führen, dass das Gerät gefahrbringend wird. Absichtliche Unterbrechung ist nicht zulässig.

### II. Spezielle Hinweise und wichtige technische Informationen

## Bitte beachten Sie die Anleitung zum Aufstellen und die erste Inbetriebnahme des Gerätes auf Seite 7 in der Bedienungsanleitung!

- 1. <u>Niemals</u> das Gerät <u>ohne Brenntisch</u> in Betrieb nehmen, da sonst der Liftteller und in Folge die Dichtungen überhitzt werden!
- 2. Dieses Gerät wurde ausschließlich für das Brennen dentalkeramischer Objekte konstruiert.
- 3. Das <u>Wärmebehandeln</u> von Materialien, die in Hinblick auf die Gefahr von Explosion, Implosion oder die Entstehung von gesundheitsgefährdenden oder brennbaren Gasen nicht unbedenklich sind, ist <u>nicht gestattet</u>! Für ausreichende Belüftung muss stets gesorgt sein.
- 4. Verletzungsgefahr besteht in der Brennkammer durch Hitze und elektrischen Stromschlag! Niemals mit den Fingern oder mit Hilfe irgendwelcher Gegenstände in der Brennkammer operieren.
- 5. Keine heißen Teile, wie z.B. Brenntisch, Brenngutträger oder Brennobjekt, mit bloßen Fingern berühren!
- 6. Aus Sicherheitsgründen Ofen nicht längere Zeit unbeaufsichtigt in Betrieb lassen!
- 7. Insbesondere den Ofen nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn die Brennkammer nach unten hin offen ist (Lift nicht auf oberster Position).
- 8. In <u>Pausen</u> zwischen den einzelnen Brennvorgängen sollte die Brennkammer verschlossen werden (Lift in der obersten Position). Dies dient der längeren Lebensdauer des Heizkörpers, Vermeidung unnötigen Energieverbrauchs und der Sicherheit)
- 9. Wenn die Brennkammer längere Zeit offen steht (Lift in unteren Positionen), kann sich die Abdeckplatte des Ofenunterteiles und das gesamte Ofenoberteil <u>stark erwärmen</u>.
- 10. Bitte platzieren Sie leicht entzündliche Materialien in ausreichendem Abstand des Gerätes und der Pumpe.
- 11. Um unnötige <u>Kondenswasserbildung</u> zu vermeiden, vor dem Ausschalten des Gerätes die Brennkammer schließen (Lift in oberster Position). Dies gilt vor allem abends.
- 12. Decken Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Geräteoberteiles ab.
- 14. <u>Temperaturkalibrierung</u>: Wir empfehlen die Kalibrierung mit Hilfe der Silberprobe <u>1 x pro Jahr</u> durchzuführen. Bei Neugeräten das erste Mal nach ca. 6 Monaten. Auch bei Auffälligkeiten (Brennergebnisse haben sich verändert) sollte eine Justierung/Kalibrierung durchgeführt werden.
  - ⇒ Die Silberprobe ist ein Hilfsmittel um den Keramikofen so einzustellen, dass er mit Neugeräten, die das Werk von DEKEMA verlassen, nahezu übereinstimmt (<u>Silberprobe =</u> <u>Referenz</u>).
  - ⇒ Vor einer Kalibrierung muss die Brennkammer überprüft werden! Der Heizkörper und das Thermoelement müssen in Ordnung sein!
  - ⇒ Ausschließlich das Original-Kalibrierset von DEKEMA verwenden!!!
  - ⇒ Wenn der Wert der Temperaturkalibrierung (CCF) verändert wird, verändern sich damit die Brenntemperaturen in allen Programmen. Entsprechend müssen <u>Brenntemperaturen</u> der einzelnen Programme gegebenenfalls <u>korrigiert</u> werden!
- 15. Der <u>Heizkörper</u> ist ein Verschleißteil und muss bei Verschleiß durch den Reparatur-Service erneuert werden. Bei Wechsel des Heizkörpers bitte die dem Ersatz-Heizkörper beiliegende Einbauanleitung beachten!

Die Lebensdauer ist abhängig von der Beanspruchung. Es gibt 2 Verschleißerscheinungen, die der Anwender sehen kann.

- ⇒ Prüfung der Brennkammer durch einen Blick von unten in die offene Brennkammer. Der Heizwendel muss homogen im Glasrohr eingelegt sein. Verformungen der Heizwendel sind ein Zeichen für Verschleiß.
- ⇒ Die Leistung des Heizkörpers wird durch Verschleiß herabgesetzt. Beobachten Sie das Display bei Temperaturanstiegsraten. Sollten Temperaturanstiegsraten nicht korrekt eingehalten werden können, so sehen Sie die aktuelle Brennkammertemperatur am Display blinken. Wurden die selben Temperaturanstiegsraten jedoch früher korrekt eingehalten, so kann dies ein Zeichen dafür sein, dass der Heizkörper verschlissen ist. <u>Vorsicht</u>: auch Spannungsschwankungen können einen Einfluss auf die Leistung des Heizkörpers haben!

- 16. Das Thermoelement misst die Brennkammertemperatur und darf auf keinen Fall verbogen sein. Hierdurch würde die Temperaturmessung beeinflusst. Es muss senkrecht von der Decke der Brennkammer nach unten zeigen. Überprüfung durch einen Blick von unten in die offene Brennkammer (Öffnung für Lift). Ein kleiner Spiegel, der schräg unterhalb der Brennkammer positioniert wird, hilft hierbei.
- 17. Die Brennkammer hat eine Nutzraumhöhe von 36 mm. Brenngutträger und Brennobjekt dürfen somit eine Gesamthöhe von 36 mm, gemessen von der Brenntischoberkante, nicht überschreiten (Gefahr, dass das Brenngut und/oder das Thermoelement beschädigt wird)!
- 18. Die Vakuumpumpe ist wartungsfrei: Jedoch kann es z.B. durch Verschmutzung der Zylinderinnenräume bzw. deren Ventile zu einer Leistungsbeeinträchtigung kommen. Durch regelmäßige Überprüfung der Leistung können solche Probleme frühzeitig erkannt werden bevor sie sich in einer Beeinträchtigung der Qualität der Brennergebnisse zeigen.
- 19. Der Brenngutträger (Objektträger) muss so positioniert werden, dass dieser nicht über die obere Kante des Brenntisches seitlich hinausragt.
- 20. Wechseln Sie nicht beliebig die Brenngutträger, da jeder einen ganz individuellen Einfluss auf die effektive Temperatur am Brennobjekt ausübt. Benützen Sie stets eine einheitliche Type Brenngutträger.
- 21. Die Brennobjekte sollten niemals direkt auf dem Brenntisch oder auf dem Brenngutträger positioniert werden, da an dieser Stelle schlechte thermische Bedingungen existieren.
- 22. Brennprogramme müssen vom Anwender mit sehr viel Sorgfalt erstellt werden. Fehlerhafte Brennprogramme können zu Qualitätseinbußen der Brennobjekte führen. Zur Sicherheit empfehlen wir Probebrände durchzuführen.
- 23. Empfehlungen für Brenntemperaturen, und andere Parameter für das Erstellen von Brennprogrammen, können stets lediglich Richtwerte sein. Entsprechend muss der Anwender ausgehend von den Richtwerten seine individuellen Parameter ermitteln.
- 24. Reinigung:
  - $\Rightarrow$  Gehäuse mit einem feuchten Tuch reinigen.
  - $\Rightarrow$  Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder brennbaren Mittel.
  - $\Rightarrow$  Dichtfläche des Lifttellers stets staubfrei halten (mit Pinsel oder feuchtem Tuch).
  - $\Rightarrow$  Liftkolben von Zeit zu Zeit mit trockenem Tuch reinigen, nicht ölen!
- 25. Beachten Sie beim Verpacken des Gerätes zum Transport:
  - ⇒ Gerät auskühlen lassen
  - $\Rightarrow$  Brenntisch abnehmen
  - ⇒ Brennkammer verschließen (Lift in oberster Position)
  - ⇒ Brenntisch und Anschlusskabel separat verpacken und mit dem Gerät in der Originalverpackung versenden
- 26. Bei einem Stromausfall wird ein laufendes Programm abgebrochen!

Bei allen technischen Fragen wenden Sie sich bitte in Deutschland an den Hersteller DEKEMA oder einen unserer Servicepartner, in Exportländern an den jeweiligen Servicepartner von DEKEMA.

DEKEMA Dental-Keramiköfen GmbH, AUSTROMAT® 3001, Version 5, 2005



max. 36mm

Teil 3

## Kurzanleitung und Programmiervorschläge

## Kurzanleitung AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001

### Zu Beginn:

Ofen einschalten, nach einigen Sekunden 

drücken. Am Display erscheint

### **MEM 0: BRENNKAMMER VORWAERMEN**

- Mit der Taste R/S das Programm MEM 0 starten. Der Ofen wärmt die Brennkammer vor.
- **Programme anwählen:** Mit den Tasten  $\rightarrow$  und  $\leftarrow$  und der Zehnertastatur.

### Liftbewegungen: Ofen öffnen/schließen: Drücken Sie und 0/9.

Programme starten: Drücken Sie kurz die Taste R/S.

Programmabbruch (Notfall): Drücken Sie die Taste R/S länger oder 2mal kurz hintereinander. **Programmende:** 

Ist der Lift heruntergefahren, so blinkt nach einigen Sekunden die Temperaturanzeige. Der Anwender hat nun folgende Möglichkeiten:

- 1. Abwarten, bis die Bereitschaftstemperatur erreicht ist. Die Software kehrt zurück ins Hauptmenü und die Brennkammer wird mit 🗔 und 9 geschlossen.
- Durch Drücken der Taste V wird die Vakuumpumpe eingeschaltet. Die Brennkammer kühlt be-2. schleunigt auf Bereitschaftstemperatur ab, die Software kehrt anschließend zurück ins Hauptmenü, die Brennkammer wird mit 📃 und 9 geschlossen.
- 3. Durch Drücken der Taste 
  wird die Abkühlphase übersprungen (die Ansteuerung der Bereitschaftstemperatur erfolgt jetzt automatisch). Die Software kehrt zurück ins Hauptmenü, die Brennkammer wird mit  $\square$  und **9** geschlossen.

### Programmdaten verändern:

- Wählen Sie das zu verändernde Programm an.
- Drücken Sie die **Taste ENT** 2mal. Bringen Sie mit → oder ← den Cursor an die gewünschte Position und überschreiben Sie die zu ändernden Daten.
  - Leerzeichen einfügen: Cursor unter ein Zeichen stellen und mit der Taste R/S alles ab Cursorposition nach rechts verschieben. Der Cursor wandert dabei mit.
  - Leerzeichen entfernen: Cursor auf Leerzeichen stellen und mit der Taste R/S den 0 Programmstring rechts von der Cursorposition löschen. Bestätigen Sie die Eingaben mit der Taste ENT. Die veränderten Daten werden gespeichert.

#### Programmnamen eingeben:

- Wählen Sie ein freies Programm an.
  - Drücken Sie die Taste ENT. Der Programmname kann eingegeben werden.
- Bestätigen Sie den Programmnamen mit Taste ENT. Geben Sie jetzt Ihr Brennprogramm ein.

### Programmstring eingeben:

Die möglichen Befehle, mit welchen Sie ein individuelles Brennprogramm erstellen können, sind:

- **C** Temperatur (z.B.  $C500 = 500^{\circ}C$ ),
  - Wertebereich: 0, 100 bis 1200 L Liftposition (z.B. L9 = Ofen geschlossen), Wertebereich: 0 bis 9 (0= offen, 9= geschlossen)
- **T** Zeit (z.B. T180 = 180s),
- **T** Piepton (z.B. T1 = 1mal Piepton),
- **V** Vakuum (z.B. V9 = ca. 20mbar),
- Wertebereich 1 bis 9

Wertebereich: 20 bis 65000

- Wertebereich: 0 bis 9
  - (0= kein Vakuum, 9= maximales Vakuum)

- ., Befehlsverbinder
  - **T360.C900** = innerhalb von 360s linear auf 900°C aufheizen 0
  - T120.L9 = innerhalb von 120s stufenweise Lift auf L9 fahren (Brennkammer schließen) 0
  - T055.C820 = mit Steigrate 55°C/min auf 820°C aufheizen, Wertebereich 02 bis 099 0 (2°C/min bis 99°C/min)

Taste ENT beendet den Eintrag und die Daten werden geprüft: Sind die Daten O.K., werden sie despeichert, Sollte ERROR am Display erscheinen, bleibt der Cursor an der Anfangsposition des fehlerhaften Programmschritts stehen.

## Programmiervorschläge

In folgenden Tabellen finden Sie unverbindliche Programmiervorschläge gängiger Keramikmassen. Die Programme sind nach Herstellerangaben umgesetzte Brennprogramme für die Programmierung von DEKEMA Dentalkeramiköfen der Serie AUSTROMAT<sup>®</sup> *3001*. In den Programmen werden die vom jeweiligen Hersteller vorgegebenen Parameter wie Steigraten, Temperaturen und Haltezeiten übernommen. Diese Größen sind abhängig von den jeweiligen Einsatzbedingungen, wie Größe und Material des Brenngutträgers/der Brennwatte, Größe und Gewicht des Brenngutes oder auch der vom Keramikhersteller beim Erstellen der Brennparameter verwendeten Brennöfen.

Um optimale Brennergebnisse zu erzielen empfiehlt DEKEMA vor dem ersten Einsatz einer Keramik die Durchführung eines Probebrandes. Wird unterschiedliches Brenngut in Ihrem AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001 gebrannt, ist die regelmäßige Durchführung eines Reinigungsbrandes angebracht. Damit lassen sich Kontaminationen und artfremde Verunreinigungen auf Brenngut und Thermoelement auf ein tolerierbares Maß reduzieren. Führen Sie Reinigungsbrände nicht mit Additiven durch!

## **Allgemeiner Sicherheitshinweis**

**AUSTROMAT**<sup>®</sup> Keramiköfen werden so konstruiert, dass auch bei besonders hohen Belastungen eine lange und einwandfreie Betriebszeit erwartet werden kann. Ist gegebenenfalls ein technischer Eingriff erforderlich (z.B. Wechsel des Heizkörpers), so sollte dieser nur von <u>autorisiertem Fachpersonal</u> vorgenommen werden.

N	Nach Instandsetzung ist der Keramikofen auf Sicherheit zu prüfen:							
	Bundesrepublik Deutschland:	VDE 0701						
	International:	laut den landesspezifischen Richtlinien						

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise im Teil 2 der Bedienungsanleitung!

## **Bescheinigung des Herstellers/Importeurs**

Hiermit wird bestätigt, dass der AUSTROMAT<sup>®</sup> 3001 in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Postverfügung 1046/1984 <u>funkentstört</u> ist.

Der Deutschen Post AG wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Gültig ab Geräte-Baujahr <u>1993</u> für die <u>230 Volt</u> - Version.